


COVID-19 | Anweisungen für die gesetzliche Vertretungsperson

Einzeltestung: Probenentnahme

Der Lolli-Test sollte idealerweise am Morgen vor dem Frühstück durchgeführt werden, da die Empfindlichkeit dann am besten ist. Sollte dies nicht möglich sein, kann der Test mit einer leicht verminderten Empfindlichkeit auch nach Nahrungsaufnahme durchgeführt werden.

1

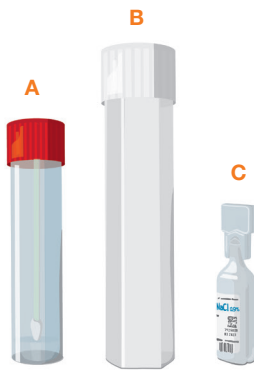


Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor Beginn des Probenahmeverganges oder tragen Sie von Beginn an Handschuhe.

Überprüfen Sie den Kit-Inhalt:


- **A** Tupferröhrchen mit roter Verschlusskappe
- **B** Transportröhrchen
- **C** Ampulle mit 5 ml NaCl
- Transportbeutel
- Barcode-Etiketten
- Auftragsformular

Schrauben Sie den Tupfer aus dem im Kit enthaltenden Röhrchen mit der roten Verschlusskappe (A) und geben Sie ihn Ihrem Kind. **Achten Sie darauf, die Tupferspitze nicht zu berühren!**

2



3




Ihr Kind nimmt die Wattespitze des Tupfers in den Mund und muss diese 30 Sekunden lang durch Vor- und Zurückbewegen der Zunge lutschen. **Nicht kauen!**


Geben Sie in der Zwischenzeit die NaCl-Flüssigkeit (C) in das Röhrchen mit der roten Verschlusskappe (A).

Führen Sie anschliessend den Tupfer in das Röhrchen (A) ein und verschliessen Sie es fest.

4

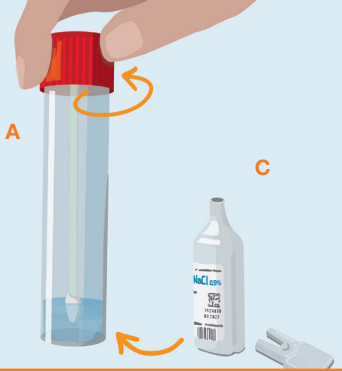

5

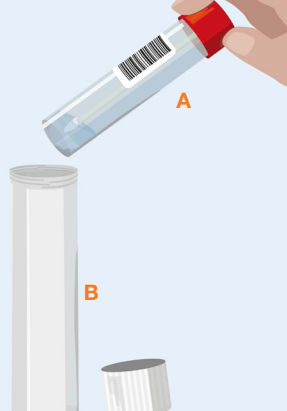

Unmittelbar danach bitte die Hände desinfizieren und/oder gründlich waschen!

Kleben Sie das Barcode-Etikett auf das Tupferröhrchen (A) und stecken Sie das Röhrchen (A) mit der Probe in das Transportröhrchen (B) und dann in den Transportbeutel.

Der Beutel muss direkt bei einem unserer Zentren abgegeben werden.

6

