


## COVID-19 | Instructions pour le représentant légal

### Test individuel : Prélèvement d'échantillon

Le test de la sucette devrait idéalement être effectué le matin avant le petit-déjeuner, car la sensibilité est la meilleure à ce moment-là. Si cela n'est pas possible, le test peut être effectué 2h après la prise de nourriture, avec une sensibilité légèrement réduite.

**1**

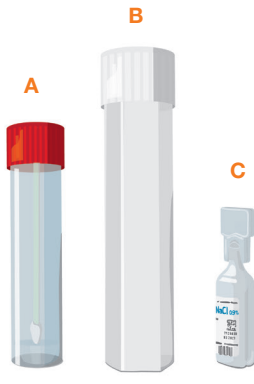


Désinfectez-vous les mains ou porter des gants dès le début du processus de prélèvement.

Vérifiez le contenu du kit :


- **A** tube-écouvillon avec capuchon rouge
- **B** tube de transport
- **C** ampoule NaCl de 5ml
- Sachet de transport
- Etiquettes à code-barres
- Formulaire de demande

Dévissez l'écouvillon du tube avec capuchon rouge (A) se trouvant dans le kit et donnez-le à l'enfant, la personne âgée ou handicapée.  
**Attention à ne pas toucher la tête de l'écouvillon !**

**2**



**3**




La personne place l'extrémité avec le coton dans la bouche et doit la sucer pendant 30 secondes : en déplaçant la langue d'avant en arrière. **Ne pas mâcher !**


Pendant ce temps, versez le liquide NaCl (C) dans le tube au capuchon rouge (A).

Insérez ensuite l'écouvillon dans le tube (A) et fermez-le de manière hermétique.

**4**

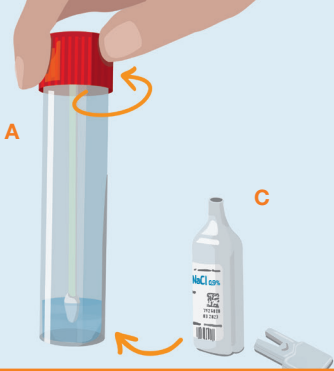

**5**

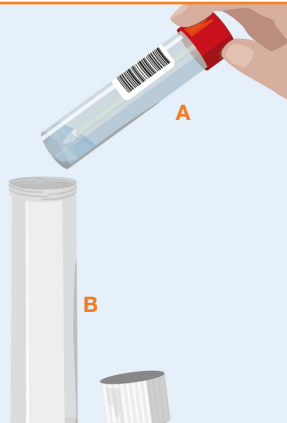


**Immédiatement après, veuillez désinfecter vos mains et/ou les laver soigneusement !**

Collez l'étiquette à code-barres sur le tube de pooling (A) et placez le tube avec le prélèvement (A) dans le tube de transport (B) puis dans le sachet de transport.

Le sachet doit être déposé directement dans un de nos centres.

**6**



Anleitung\_Probenahme\_Lolli-PCR-Single test\_CH\_FR/23.11.2021

www.synlab.ch