

Set per punzione

Analisi richiesta	Note	Sterile in condizioni native	EDTA
Conta cellulare	eventualmente con differenziazione		X
Coltura	inviare la maggiore quantità possibile di liquido	X	
Cristalli		X	
Chimica	proteine, glucosio, acido urico, CRP, LDH, RF, C3, C4, peso specifico	X	
Microbiologia	PCR per Borrelia, ecc.	X	
Citologia	inviare una provetta supplementare	X	

Indicare nel formulario di richiesta le seguenti informazioni:

1. Sede del tessuto sottoposto a punzione (p. es. ginocchio)
2. Quantità prelevata (se possibile inviare tutto il materiale)

La conta cellulare e le analisi citologiche richiedono una rapida elaborazione del campione.

Il materiale deve pervenire in laboratorio **entro 2 ore dal prelievo**.

Si prega di avvisare il laboratorio in anticipo, in modo da poter coordinare il ritiro del campione ed effettuare le necessarie preparazioni in laboratorio.