

Instructions pour le prélèvement d'un frottis nasopharyngé

Test PCR visant à détecter le virus du SARS-CoV-2

Le test de détection du coronavirus (SARS-CoV-2) peut se faire de différents types d'échantillonage, dont le frottis nasopharyngé.



- **1.)** La personne qui effectue le prélèvement doit porter une tenue de protection (gants, blouse, masque, lunettes de protection).
- **2.)** Le patient descend son masque sous le nez et le garde sur sa bouche.

Le patient se mouche et garde un mouchoir en main (au cas où il doit éternuer après le prélèvement).






3.) Pencher la tête du patient légèrement vers l'arrière et la soutenir de la main non dominante.

Demander au patient par quelle narine il respire le mieux : utiliser cette narine pour le prélèvement.

4.) Introduire l'écouvillon presque à l'horizontale le long de la cloison nasale jusqu'à la paroi du pharynx (l'enfoncer d'env. 8 cm ou jusqu'à sentir une résistance élastique).

Faire tourner l'écouvillon env. 5 secondes à cet endroit, puis le retirer.

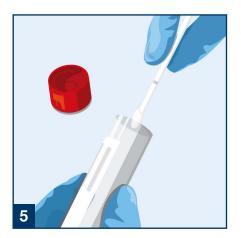

- **5.)** Mettre l'écouvillon dans le tube de transport.
- **6.)** Casser la tige à l'emplacement prévu à cet effet, fermer le couvercle.

