

## Neu: eSwab mit drei Tupfergrössen

Anstelle eines separaten Entnahmesets für Keuchhusten\* und anstelle der bisher separat mitgelieferten Tupfer aus Nylonwatte gibt es jetzt ein optimales Allzweck-eSwab-Entnahmeset. Es gibt drei Tupfergrössen; alle aus einem speziell präparierten Nylon, welches die Erregerausbeute maximiert und gegenüber der Nylonwatte deutliche Vorteile bringt.

Alle Tupfer haben eine Sollbruchstelle (rote Markierung), so dass sie für den Transport ins Röhrchen verbracht werden können. Der grüne Tupfer ist etwas länger als das Röhrchen, findet aber problemlos darin Platz.

### Einsatz der Tupfer

- weiss:** normal grosser Tupfer für alle Abstriche
- violett:** feiner Tupfer, z.B. für Cervixabstriche bei Nullipara oder Urethralabstriche beim Mann
- grün:** extrafeiner Tupfer für transnasale Abstriche (Keuchhusten, Influenza und andere respiratorische Viren, Mykoplasmen)

\* Das eSwab-Entnahmeset ersetzt das bisherige Pertussis Set.

