

## QuantiFERON®-TB Gold Plus

Diese Version des Tuberkulose-spezifischen Lymphozyten-Stimulationstests enthält jetzt vier statt bisher drei Röhrchen. Im Set befinden sich nebst den Kontrollen (grau und violett) zwei Röhrchen mit spezifischen Tuberkulose-Antigenen (gelb und grün). Die Teströhrchen enthalten spezifische Tuberkulose-Antigene. Das grüne (TB1) Röhrchen ist optimiert für die Messung der CD4-Zellantwort, das gelbe (TB2) misst CD4- und CD8-Antworten.

### Bei der Blutentnahme bitte folgende Punkte beachten:

- Die Röhrchen füllen sich nur wenig (ca. 1 ml bis zur schwarzen Markierung), unter Umständen nur langsam, bitte lange genug warten.
- Der Füllstand muss 0.8 ml bis 1.2 ml betragen (schwarzer Balken). Ungenügend gefüllte oder überfüllte Röhrchen sind für den Test ungeeignet, bitte neu abnehmen.
- Die Röhrchen nach der Entnahme sofort kippen, damit die Probe nicht gerinnt, vor allem bei schwieriger Entnahme.
- Die Lymphozyten müssen frei herumschwimmen können; geronnene oder teilweise geronnene Proben sind ungeeignet, bitte neu abnehmen.
- Der Test funktioniert mit lebenden Lymphozyten, daher Temperaturextreme vermeiden (kein Kühlschrank, nicht in den Briefkasten stellen) und nicht zentrifugieren.
- Die Röhrchen müssen nach spätestens 16 Stunden im Labor sein. Falls dies nicht möglich ist, bitte mit dem entsprechenden synlab Labor Kontakt aufnehmen.



*Die bisherigen Sets mit drei Röhrchen können Sie bis zum Verfalldatum problemlos weiter verwenden.*