


## FIT-SCREENING


### ISTRUZIONI PER IL PRELIEVO



1 Etichettare il tubicino di prelievo:  
 Nome e cognome  
 Data di nascita  
 Data del prelievo

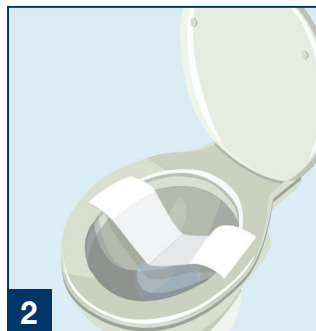

2 Appoggiare un foglio per la raccolta delle feci incluso nel KIT nella tazza del water.

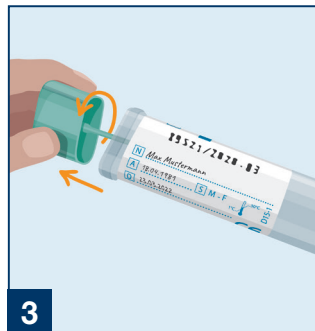


3 Svitare il tappo del tubicino di prelievo ed estrarre il cappuccio turchese incluso lo stick.



4 Introdurre la punta dello stick in diversi punti del campione di feci.



5 Non riempire eccessivamente lo stick. Le feci devono essere accumulate solo nelle scanalature della punta. E' sufficiente una quantità minima del campione.

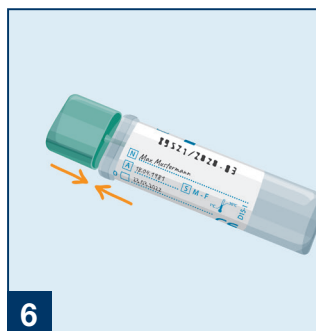

6 Inserire lo stick di prelievo solo una volta nel tubicino e chiuderlo con un «click». Non effettuare più volte la raccolta!



7 Agitare bene il tubicino campione, inserirlo nel sacchetto verde (protetto dalla luce) presente nel kit.



8 **Mettere il sacchetto di plastica e il documento di richiesta dell'analisi** riempito dal vostro medico nella busta affrancata e rispedirlo il giorno stesso o il giorno successivo per posta. È inoltre possibile consegnare il sacchetto presso uno dei nostri centri di prelievo o presso il più vicino laboratorio SYNLAB\*.

\*Un elenco di tutti i centri di prelievo e laboratori SYNLAB è disponibile all'indirizzo seguente [www.synlab.ch](http://www.synlab.ch)

