


Informazioni importanti sul contenitore di spedizione BD SurePath™

Il contenitore di spedizione BD SurePath™ dispone di un sistema che facilita il distacco della testa dello spazzolino. In questo modo, grazie alla combinazione con il Rovers Cervex-Brush (testa rimovibile), il 100% degli strisci cellulari prelevati arriva ad essere elaborato in laboratorio. Il BD SurePath™ può essere utilizzato come sempre con il PrepMate.

Procedura per un prelievo dei campioni semplice ed efficiente:

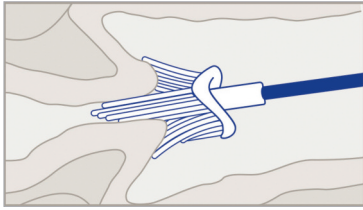

1. Prelievo del campione

Striscio dell'orifizio esterno dell'utero/della cervice (secondo le indicazioni del produttore dello strumento).



2. Separazione dello spazzolino

Inserire la testa dello spazzolino nell'apertura grande del contenitore di spedizione BD Sure-Path™. Ruotando il manico è possibile separarlo dalla testa dello spazzolino.



3. Spedizione

Chiudere il contenitore di spedizione BD SurePath™ e **applicare al campione in senso verticale il codice a barre MEDISYN**. Inviare al laboratorio synlab il contenitore di spedizione insieme al nuovo formulario di richiesta di patologia compilato.

Se ha altre domande, si rivolga al suo consulente clienti o chiami il nostro servizio di assistenza (0800 393 393). In caso di domande di carattere medico la metteremo volentieri in contatto direttamente con il citopatologo responsabile.